

 Manual de usuario

Espaciador para
aerosol con válvula

Cámara antiestática

Modelo: **AS175**



 Fabricante: Rossmax (Shanghai) Incorporation Ltd.,
No. 6018 Huyi Road Waigang, 201806 Jiading District,
Shanghai, China

Importa, distribuye y garantiza: Tenacta S.A.
Girardot 1449 (C1427AKE) - C.A.B.A. - Argentina

Autorizado por ANMAT PM 1124-33
Responsable Técnico: Bioing. Ana Cecilia Vinzio Maggio

www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar

Venta libre

Libre de Bisfenol A




II0023-Rev. 01

Hecho en China

Introducción

La cámara está diseñada para utilizarse con inhaladores de dosis medida (IMD) para suministrar medicación en aerosol a sus pulmones según la prescripción y control de su médico o especialista. Para uso doméstico, hospitalario y clínico. Solo para uso personal individual. Recomendado para pacientes: AS175 con mascarilla pequeña: 0-1.5 años; AS175 con mascarilla mediana: 1-5 años; AS175 con mascarilla grande: a partir de 5 años; AS175 boquilla (5 años y +).

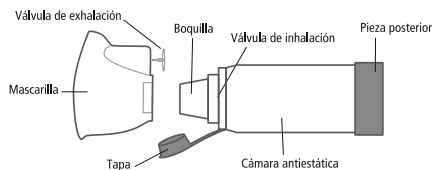

Precauciones


1. EL dispositivo debería ser reemplazado después de 1 año de uso.
2. Asegúrese que sigue el proceso de limpieza correctamente.
No hierva, esterilice o lave en el lavavajillas la cámara o la máscara.
3. Asegúrese de seguir las instrucciones de su médico.
4. Mantenga la cámara fuera del alcance de los niños. La cámara no es un juguete.
5. Los niños no pueden utilizar este dispositivo solos y solo deberían usarlo con la ayuda de un adulto o doctor.

Notas:


1. La cámara está fabricada con material antiestático para prevenir que la medicación se quede adherida a las paredes de la cámara.
2. El dispositivo no está fabricado con látex natural.
3. Este dispositivo es solo para uso personal individual.
4. Cuando no vaya a ser utilizado, guarde el dispositivo y / o la máscara en un lugar limpio y seco.

Instrucciones de uso


Antes de usar, revise la cámara cuidadosamente. Asegúrese que la cámara esté limpia y sin ningún tipo de suciedad, polvo u objeto extraño. Si nota cualquier defecto, cambie la cámara.

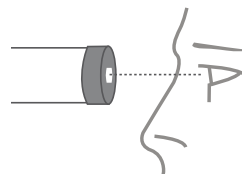


- 1 Quite la tapa tanto de la boquilla del inhalador como de la cámara.
Cuando utilice la máscara, inserte la máscara de forma segura en la boquilla.

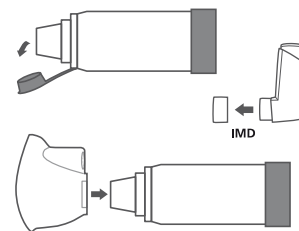


2 Agite el inhalador e inserte este en su alojamiento en la parte posterior de la cámara.

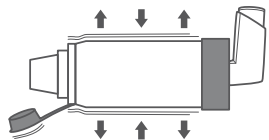


3 Coloque la boquilla entre los labios para asegurar que quede bien sellado. Coloque la máscara sobre la boca y la nariz de forma que asegure un buen sellado.

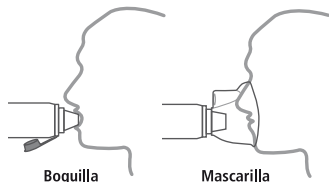

4 Respire suavemente. Presione el inhalador al comienzo de una inhalación lenta. Entonces respire lenta y profundamente por la boca hasta que se haya tomado una inhalación. Si es posible, mantenga la respiración durante unos 5-10 segundos. De lo contrario, mantenga los labios apretados sobre la boquilla y respire unas 2-3 veces a través de la cámara después de pulsar el inhalador.

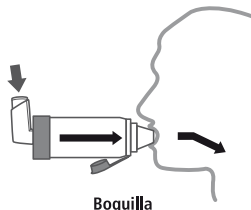

5 Exhale suavemente. Pulse el inhalador en el comienzo de una inhalación lenta, y luego mantenga el sellado durante 5-6 respiraciones después de pulsar el inhalador.

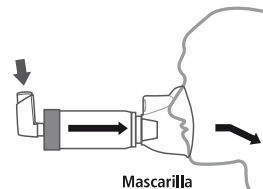


6 Siga las instrucciones suministradas con el inhalador en relación al tiempo de espera, antes de repetir los pasos 3-5.




Instrucciones de limpieza

A Se recomienda limpiar la cámara y la máscara una vez por semana. No manipule ni retire la válvula de la cámara durante la limpieza. Retire la tapa de la boquilla (si procede) y pieza posterior.

Nota: Si ha utilizado la máscara, retire también la máscara.

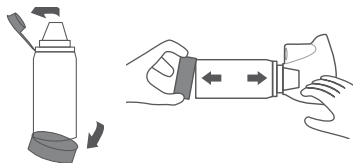


B Sumerja las piezas desmontadas durante unos 15 minutos en agua caliente con detergente líquido. Limpie y agite suavemente. Enjuague las piezas con agua tibia.

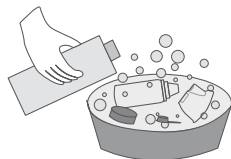

C Sacuda el exceso de agua y deje secar al aire en posición vertical. Asegúrese que las piezas estén totalmente secas antes de volver a montarlas.



D Para montarlas, ajuste la pieza posterior en la parte de atrás de la cámara y coloque la boquilla en la cámara. La tapa de protección, si es aplicable, debería estar siempre colocada en la boquilla si la cámara no va a ser utilizada.

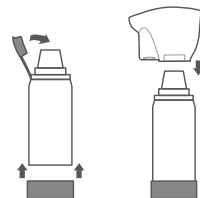

Nota: Si va a usar la máscara, colóquela sobre la boquilla.

Condiciones de Almacenamiento y operación: 5°C-40°C, 15-95% HR

Garantía

Esta garantía es válida por el termino de 1 año de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del producto ni tampoco roturas o maltrato. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y la respectiva factura de compra.

Modelo: Fecha de compra:

Comercio: